












	<p style="text-align: center;">INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA</p> <p style="text-align: center;">niepudrowane diagnostyczne rękawice nitylowe, niesterylne, przeznaczone do jednorazowego użycia, 100szt.</p> <p style="text-align: center;">ESSENTI CARE SAFE</p>
Ilość:	100 sztuk w opakowaniu jednostkowym
Rozmiary:	S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10)
Opis produktu:	<p>Rękawice diagnostyczne, niesterylne, koloru niebieskiego</p> <p>Surowiec: nityl</p> <p>Bezpudrowe</p> <p>Powierzchnia zewnętrzna – teksturowana na palcach</p> <p>Mankiet: równomiernie rolowany</p> <p>AQL: 1,5</p> <p>Kształt uniwersalny – pasujące na obie dłonie (lewą i prawą).</p> <p>Okres ważności: 3 lata (od daty produkcji)</p>
Przeznaczenie:	Rękawice jednorazowego użycia do czynności diagnostycznych, kosmetycznych, spożywczych.
Kontakt z żywnością:	Rękawice są bezpieczne do kontaktu z żywnością.
<p>Deklarowana zgodność</p> 	<p>Wyrób medyczny zgodnie z Rozporządzeniem (MDR) 2017/745 klasy I, Reguły 1 i 5 oraz normami EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3: 2015 oraz EN 455-4: 2009</p> <p>Bezpieczne do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) 10/2011 oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) 1935/2004</p>
Wytwórca	<p>MONDO Sp. z o.o.</p> <p>ul. Katowicka 139</p> <p>43-346 Bielsko-Biała</p> <p>www.essencare.eu</p>
Środki ostrożności dotyczące użytkowania:	<p>Przed użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie są uszkodzone. Wadliwa rękawica nie nadaje się do użytku.</p> <p>Przed założeniem rękawic sugerowane jest dokładne osuszenie rąk. Po</p>

	<p>każdorazowym zdjęciu rękawic wskazane jest dokładne umycie rąk, osuszenie i nałożenie kremu nawilżającego.</p> <p>Jedna para rękawic powinna być użyta do kontaktu wyłącznie w jednej procedurze.</p> <p>W przypadku uszkodzenia rękawicy (przekłucia, rozcięcia czy rozdarcia) w trakcie użytkowania należy ją natychmiastowo zmienić.</p> <p>Unikać zakładania rękawic zabrudzonych od strony wewnętrznej – mogą wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów.</p> <p>Rękawic nie należy używać w styczności z ogniem oraz do ochrony przed wszelkiego rodzaju ostrymi narzędziami. Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem jonizującym, ani do ochrony termicznej (przed działaniem zimnych i gorących przedmiotów).</p>
Zakładanie rękawic:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przed nałożeniem rękawic należy: <ol style="list-style-type: none"> a. Osuszyć skórę rąk. b. Upewnić się, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. c. Otworzyć opakowanie poprzez naciśnięcie kciukiem miejsca perforacji i oderwanie owalnej części opakowania tak aby powstał otwór dozujący. 2. Pobrać jedną rękawicę z opakowania wyciągając ją z otworu dozującego za mankiet. 3. Każdą wyjmowaną rękawicę należy sprawdzić czy nie posiada widocznych wad takich jak zabrudzenie czy też uszkodzenie mechaniczne. Nie należy używać rękawic z wadami. 4. Nałożyć wyjętą rękawicę na przeciwną dłoń (do tej, która ją wyjmowała) trzymając rękawicę za mankiet. 5. Pobrać drugą rękawicę za pomocą dłoni już ubranej w rękawicę. 6. Nałożyć na nieubraną jeszcze dłoń trzymając rękawicę za mankiet.
Zdejmowanie rękawic:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rękawicę, którą chce się zdjąć chwycić palcami przeciwnej ręki za mankiet i zdjąć wywijając ją na drugą stronę. Przytrzymać w dłoni z rękawicą. 2. Wsunąć palce dłoni bez rękawicy pomiędzy mankiet rękawicy a nadgarstek dłoni ubranej w rękawicę i ściągnąć wywracając jednocześnie na drugą stronę w taki sposób aby pierwsza zdjęta rękawica znalazła się wewnątrz drugiej. 3. Obie rękawice należy zdejmować nie dotykając skontaminowanej ściany rękawic. 4. Zdjęte rękawice należy traktować jako odpad medyczny.
Czyszczenie:	Rękawice jednorazowe nie podlegają czyszczeniu.
Przechowywanie:	<p>Rękawice należy przechowywać w chłodnym miejscu pozbawionym wilgoci w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 5 do 35°C oraz chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem światła słonecznego i fluorescencyjnego.</p> <p>Zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane rękawice to 60 +/- 20%.</p> <p>Rękawice przechowywać w odległości co najmniej 1m od źródła ciepła (urządzeń grzewczych, ognia, ozonu).</p> <p>W bezpośrednim sąsiedztwie rękawic nie przechowywać rozpuszczalników, olejów, paliw czy smarów.</p> <p>Przy prawidłowym przechowywaniu właściwości fizyczne rękawic są zachowane przez okres 3 lat od daty produkcji zawartej na opakowaniu.</p>
Utylizacja:	Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub niebezpiecznymi substancjami. Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.
Deklaracja zgodności:	Dostępna na stronie www.essenticare.eu

Symbole stosowane w oznakowaniu przez producenta

	data produkcji		nazwa i adres wytwórcy
	data przydatności do użycia		wyrób jednorazowego użytku
	numer LOT określający numer serii produkcyjnej		znak CE
	należy zapoznać się z instrukcją użytkownika		wyrób dopuszczony do kontaktu z żywnością
	warunki przechowywania: chronić przed światłem		warunki przechowywania: chronić przed wilgocią
	warunki przechowywania: przechowywać w temperaturze 5-35°C		wyrób medyczny

Instrukcja użytkownika: 05052021/ APR
Rev: 25052021/ APR